

GUIA PÓS-OPERATÓRIO

A MARCA DO
SEU IMPLANTE
DENTÁRIO
FAZ TODA
A DIFERENÇA

 **NEODENT**[®]

A MARCA DE IMPLANTES DENTÁRIOS MAIS
UTILIZADA PELOS DENTISTAS NO BRASIL

A man with a beard and short dark hair is sitting on a boat, smiling broadly. He is wearing a light blue polo shirt and dark shorts. He is holding a purple thermos in his right hand. The background shows a body of water and a forested hillside under a cloudy sky. A blue rope is visible in the foreground.

*GUIA DE CUIDADOS
PÓS-OPERATÓRIO.*

COLOQUEI MEU IMPLANTE, E AGORA?

A escolha da marca do implante dentário faz toda a diferença para um tratamento seguro e confiável. E agora você pode sorrir com mais tranquilidade e aproveitar os momentos bons que a vida tem para oferecer, com seu implante dentário Neodent.

Entretanto, as boas escolhas não dispensam a necessidade dos cuidados pós-operatório para um resultado satisfatório e saudável. Afinal, após qualquer intervenção cirúrgica, o corpo humano precisa de um tempo para se recuperar. Para que tudo aconteça dentro do planejado, é preciso que a fase de recuperação ocorra com precisão.

Por isso, ajudaremos você a descobrir quais os cuidados necessários nesta fase que é tão essencial. Procure sempre seu cirurgião-dentista para acompanhar você em todas as fases do seu tratamento.

LEMBRE-SE!

Cada ser humano é único e a recuperação varia de pessoa para pessoa.

CUIDADOS IMEDIATOS

BOCA E LÁBIOS



- Faça compressas com gelo no rosto sobre a área operada de acordo com a indicação do cirurgião responsável pelo caso (procure proteger a pele do contato direto com o gelo utilizando um pano fino)
- Mantenha os lábios lubrificados com hidratante labial
- Procure não cuspir, fazer bochechos, nem sucção (não se alimente com canudo) de acordo com o período indicado pelo seu cirurgião-dentista



DORES



- Procure tomar a medicação nos horários corretos, conforme a prescrição do dentista, pois isso pode ajudar a aliviar possíveis desconfortos. Caso haja algum sangramento em excesso, procurar o cirurgião-dentista para orientações

REPOUSO



- Procure evitar fazer esforço físico
- Não dirija
- Evite falar em excesso, de preferência, fale pouco e baixo

CUIDADOS GERAIS

ALIMENTAÇÃO



- Evite beber ou comer até que o efeito da anestesia passe, principalmente alimentos ou bebidas quentes, tais como café e chá, especialmente nas primeiras 24 horas após a cirurgia
- Não fume e não ingira bebidas alcoólicas
- Mastigue do lado oposto ao que foi realizada a cirurgia
- Procure ingerir alimentos líquidos ou pastosos, frios e gelados (sucos de fruta, sorvetes, iogurtes, coalhadas, caldos e sopas frias), especialmente nas primeiras 24 horas após a cirurgia



- Não deixe acumular alimentos sobre os pontos (utilize cotonetes molhados em antissépticos para limpar o local)
- Tome água à vontade, a hidratação é muito importante
- Evite alimentos que soltem farelos (pães e farinhas)
- O retorno aos hábitos alimentares normais deve acontecer gradativamente, a partir do terceiro dia
- Procure não ingerir a medicação com estômago vazio



AMBIENTES

- Procure evitar ambientes quentes ou abafados
- Evite exposição ao sol, sereno ou chuva



CUIDADOS GERAIS

NA HORA DE DORMIR



- Procure dormir com a cabeça mais elevada que o corpo (utilize mais de um travesseiro)
- Deite com a cabeça para cima ou para o lado contrário ao operado
- Não toque na área dos pontos da cirurgia com os dedos ou qualquer objeto (clipe, palito etc.)

HIGIENE BUCAL



- Escove os dentes de preferência sem ou com pouca pasta, exceto a(s) área(s) operada(s), onde deve ser utilizada uma escova pós-cirúrgica (sem tocar na gengiva)
- Escove a língua e utilize o limpador lingual
- Utilize fio dental normalmente, com exceção da região operada, que deve retomar o uso normal em 10 dias
- Antes de utilizar o fio dental na região operada, recomendamos que você aguarde autorização de seu cirurgião-dentista
- Aplique a solução antisséptica de acordo com a prescrição do cirurgião-dentista



AINDA ESTOU COM INCHAÇO, ISSO É UM PROBLEMA?

Se o inchaço persistir por mais de 6 dias após a cirurgia, procure seu cirurgião-dentista.

Saiba que os cuidados durante as primeiras 24 horas são fundamentais para uma melhor recuperação.

ORIENTAÇÕES EXTRAS

- Se os músculos de sua boca estiverem doendo, massageie-os
- Se após 7 dias você ainda estiver com dores e dificuldades para abrir a boca, entre em contato com seu cirurgião-dentista
- Converse com o seu cirurgião-dentista sempre que tiver alguma dúvida

© 2019 - JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.
Todos os direitos reservados.
Neodent® é uma marca registrada da JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A.

(BRO_POS_STD_BRV1)

neodent.com.br

0800 707 2526

 **NEODENT®**

A MARCA DE IMPLANTES DENTÁRIOS MAIS
UTILIZADA PELOS DENTISTAS NO BRASIL